



reducept

# Pico Handleiding

Versie: September 15, 2020



# Pico headset

In deze handleiding leggen we uit hoe je je Pico headset voorbereidt op het gebruik van Reducept. Je kunt beginnen met het aansluiten van de headset op je WiFi-netwerk, gevolgd door het downloaden van het Reducept-spel op de Pico. Start nu Reducept op je Pico!

## Inhoud


<b>Eerste keer instellen van je apparaat</b>	<b>3</b>
<b>Hoe maak je verbinding met wifi</b>	<b>6</b>
<b>Hoe download je Reducept in de winkel</b>	<b>9</b>
<b>Log in op de Reducept app</b>	<b>11</b>
<b>Tips &amp; Trucs</b>	<b>14</b>






## Eerste keer instellen van het apparaat

1. Zet de Pico G2 4K op en druk de "Aan-knop" ongeveer 3 seconden in.

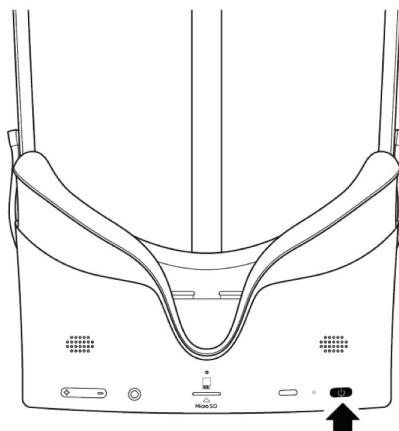

2. De installatie hulp start vanzelf
  - a. Sluit de controller aan als je wilt. Anders klik je op overslaan.

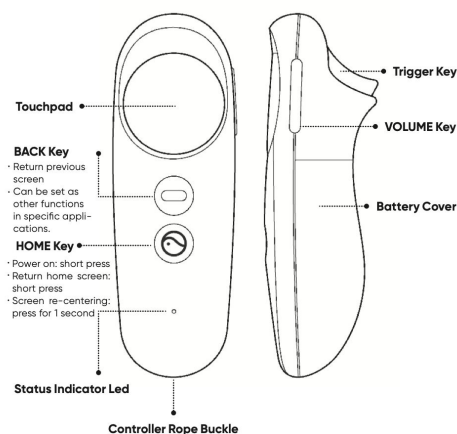

- b. Kies de taal. - Klik dan op "Ok".
  - c. De knoppen worden uitgelegd in de headset. - Klik op "Ok"
  - d. De privacyovereenkomst verschijnt in de headset. Accepteer ze en klik op "volgende".
  - e. De radius wordt uitgelegd - Klik op "doorgaan".
3. You zit nu in het hoofdmenu van de Pico G2 4K.



## Hoe maak je verbinding met WiFi

1. Klik op het Wi-Fi-Symbool in de taakbalk.
2. Klik op "WLAN" om het aan of uit te zetten.
3. De headset zal automatisch zoeken naar eventuele Wi-Fi in de omgeving.
4. Kies je Wi-Fi en voer het wachtwoord in.
5. Klik na het invullen op de invoer toets.
6. Klik op connect - de headset maakt verbinding met de gekozen Wi-Fi.





## Hoe download je Reducept in de PICO Store

1. Klik op "Opslaan" in het Pico hoofdmenu.
2. Maak een Pico-account aan in het apparaat of registreer je account hier

[https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en\\_US](https://us-passport.picovr.com/register/regpre?lang=en_US)

3. Zoek in de winkel naar de Reducept-applicatie.
4. Klik op download.
5. De applicatie verschijnt dan in je bibliotheek.



## Inloggen in de Reducept app

1. Start de Reducept app zoals beschreven in 'Reducept starten op je headset'.
2. Richt je vizier op 'Inloggen'




3. Voer je emailadres in en het wachtwoord dat je hebt ingesteld in het Reducept dashboard en richt je vizier daarna op de knop 'Inloggen'.





4. Je bent nu ingelogd.

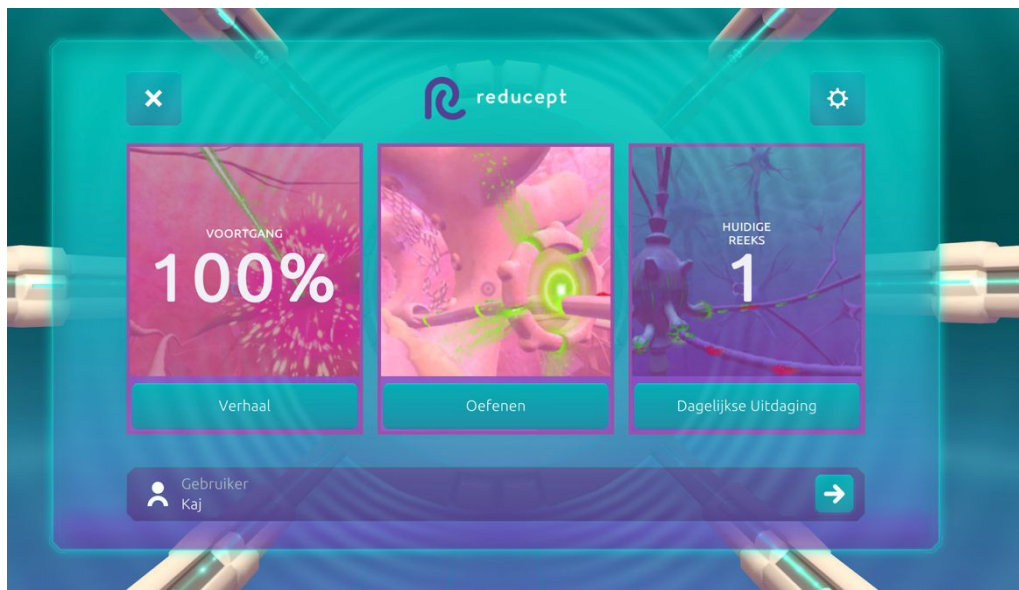



## Tips & Tricks

### **Pico knop**

De Pico knop bevindt zich op de controller en op de headset. Op de knop staat het Pico symbool.

Als je de Pico knop een paar seconden ingedrukt houdt, kom je in het hoofdmenu bij elk moment. De lopende applicatie wordt geminimaliseerd, niet afgesloten.

- Dubbelklikken op de Pico knop opent de taakmanager. Je zult in staat zijn om 'Schakel' of sluit hier de actieve applicaties.

- Om het uitzicht te 'centreren', kijk je recht vooruit en houd je de Pico knop ingedrukt (ofwel op de headset of op de controller) voor ongeveer 2 Sec.

### **Terug knop**

- Met de terugknop kun je naar de vorige pagina gaan, maar de huidige applicatie sluit niet als je wisselt.

